


# bonein.eu

KOSTNÍ NASLOUCHÁTKA

**BN803**

**Uživatelský  
manuál**

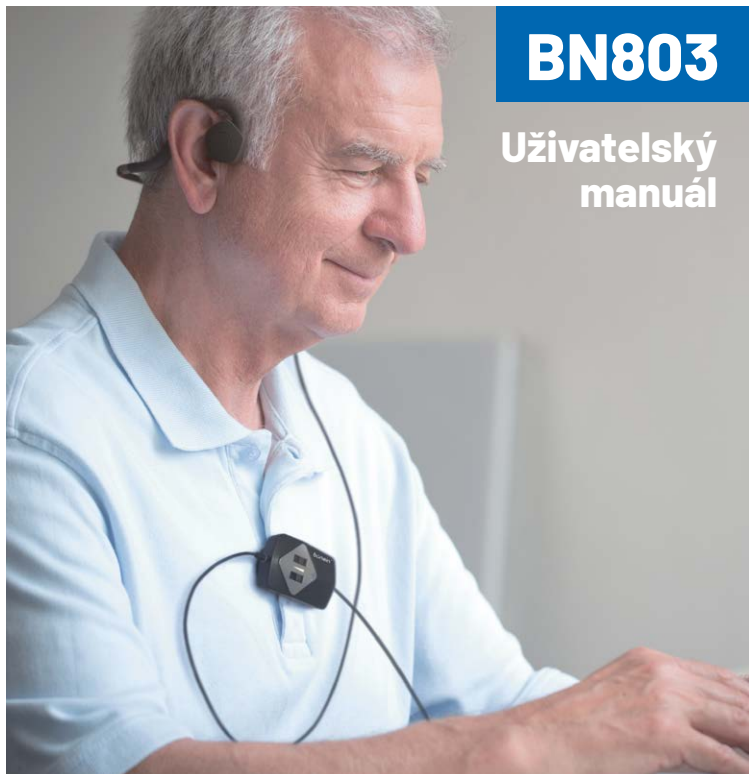

**BN803**

# Naslouchací zařízení s kostním vedením


## BN-803 Uživatelský manuál

### 1. Popis produktu

**BN-803 je oboustranné kostní naslouchátko. Zvuk je veden oboustranně přes kost – stereo s digitálním převodem, vhodné pro osoby se ztrátou či poškozením sluchu.**

- 7 frekvencí pro Váš nejlepší výběr zvuku
- Nezávislé nastavení hlasitosti pro obě strany zvlášť.
- Připojitelné k různým zařízením jako mobilním telefon, TV, rádio či počítač.

### 2. Komponenty – popis přístroje

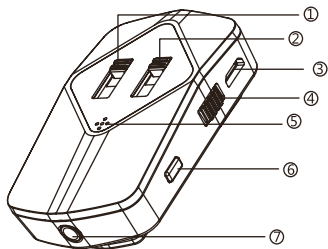

1. Pravé ovládání hlasitosti
2. Levé ovládání hlasitosti
3. USB nabíjecí port
4. On/Off – zapínání/vypínání přístroje
5. Mikrofon příjmu zvuku
6. Tlačítko pro změnu frekvence
7. Externí port pro spojení s dalším zařízením

### 3. Usazení přístroje

Sluchátka přístroje se nasazují tak, aby čelenka vedla za hlavou a přenosová sluchátka seděla před uchem na kosti. **Nevkládá se do uší!**



### 4. Instrukce k ovládání přístroje

- Nasadte sluchátka dle obrázku a popisu výše
- Ztlumte hlasitost na minimum a zapnete přístroj spínačem On/Off
- Zvyšte hlasitost dle potřeby
- Stiskněte tlačítko frekvence a chvíli počkejte na přeladění. Opakujte (7 frekvencí), až najdete Vám nejpříjemnější nastavení.
- Pokud chcete propojit naslouchátko s dalším zařízením, použijte audio kabel. (součástí balení)

#### Poznámka:

- **V případě, že je přenosová krabička příliš blízko sluchátek, můžete slyšet pískot. V tom případě umístěte krabičku dále, dle dosahu kabelu. Nebo ztište hlasitost.**
- **V případě, že je zapojen přístroj k jinému zařízení, funkce snímání zvuku (mikrofon – bod 5 výše) se automaticky vypne.**

## 5. Světelný ukazatel (LED kontrolka na kabelu vedoucímu od krabičky ke sluchátkům)

Barva	Stav
Červená a Modrá (bliká 3 vteřiny)	Zapnuto
Modrá (plně svítí)	V provozu
Červená (bliká)	Slabá baterie
Červená (plně svítí)	Nabíjí se
Kontrolka zhasne (při nabíjení)	Nabíjení dokončeno
Červená a modrá (bliká)	Při změně frekvence

## 6. Instrukce k nabíjení

- Při nabíjení přístroj vypněte! Použijte přiložený dobíjecí USB kabel (součástí balení)
- Červená kontrolka při nabíjení plně svítí, po plném dobití baterie kontrolka zhasne.
- Běžný čas do plného nabití je cca 3 hodiny. **Nenechávejte přístroj nabíjet déle než 24 hodin. Hrozí poškození či snížení životnosti baterie.** Ideálně po plném dobití zařízení odpojte od sítě.

## 7. Specifikace

- Plný provoz přístroje je cca 8-12 hodin
- Doba nabíjení cca 3 hodiny
- Typ baterie: Lithium-ion baterie 3.7V 350mAh
- Citlivost snímání: -54+/-2dB
- Váha: 35g (sluchátka) ; 34g (krabička)
- Rozsah frekvencí: 100Hz-18KHz
- Typ reproduktoru: kostní přenos zvuku

## 8. Řešení problémů

<b>Jev</b>	<b>Možný důvod</b>	<b>Řešení</b>
On/Off spínač nefunguje.	Slabá baterie	Dobijte baterii
Nepřenáší externí zvuk.	Připojeno k jinému zařízení.	Odpojte kabel (u obou vstupů)

## 9. Uchovávání a údržba

- Před prvním použitím zařízení nabijte na plnou kapacitu baterie
- Skladujte a uchovávejte zařízení na suchém místě při pokojových teplotách (10-25C)
- Nepoužívejte na přímém dešti či při bouřce
- Pokud zařízení není delší dobu v provozu, dobijte jej před opětovném použití
- Čistěte suchým hadříkem, nepoužívejte vodu!

## 10. Záruka

- Základní záruka je 24 měsíců (Vyřešení reklamace do 30ti dnů)
- Záruka se nevztahuje na poškození vlastním zaviněním
- Záruka automaticky zaniká při neautorizovaném otevření částí přístroje
- Pokud je potřeba servis či oprava, kontaktujte autorizovaného dealera

## 11. Varování

- Zařízení nerozebírejte, vyhněte se úderům, pádům či bouchání s přístrojem. Jedná se o citlivé elektronické zařízení.
- Nevhazujte nikdy do ohně
- Nenechávejte při nadměrné teplotě či příliš dlouho na přímém slunci

## 12. Příslušenství

Položka	Počet
Sluchátka	1 ks
Micro-USB kabel	1 ks
Audio kabel	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks



**Kontakt:**

**Bonein Europe s.r.o.**

Kamenný obchod:  
Kaznějovská 2111/6a  
Plzeň-Bolevec  
323 00

[info@bonein.eu](mailto:info@bonein.eu)

**Tel.: +420 773127142**